

Man könnte sagen: Es liegt uns im Blut.

CRITIKON® Blutdruckmanschetten von GE Healthcare




Inhalt

Philosophie	3
Standardisierung	4
Infektionskontrolle	6
Funktionalität	8
DURA-CUF®	10
SOFT-CUF®	12
CLASSIC-CUF®	14
SENSA-CUF®	16
CRITIKON® Neonatal	18



Lösungen für alle klinischen Bereiche

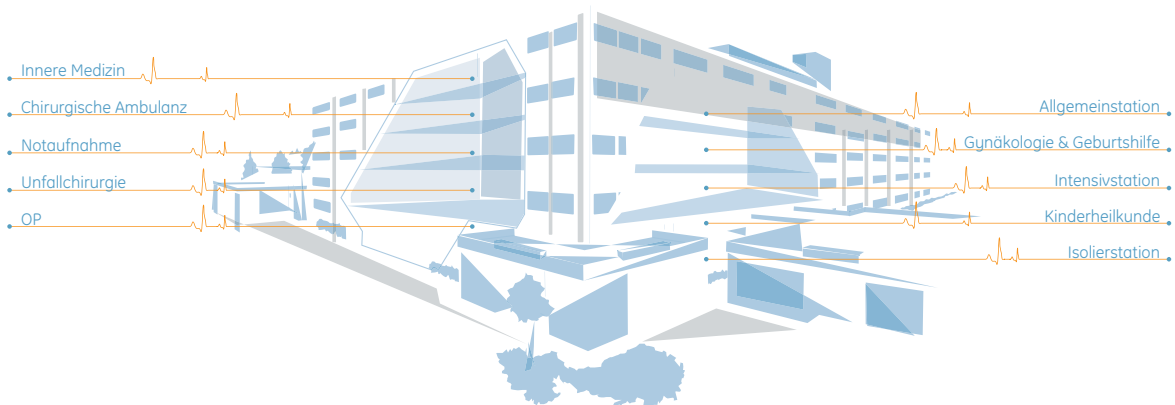

Philosophie

CRITIKON® , eine führende Marke

Bei GE hat die Kenntnis und Umsetzung von Kundenbedürfnissen oberste Priorität. Nur so sind wir in der Lage Lösungen zu entwickeln, die zuverlässig, hilfreich und benutzerfreundlich sind.

CRITIKON® Blutdruckmanschetten werden mit hochkomplexen Herstellungsverfahren und modernster Technologie produziert, so dass sie jederzeit höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Vier Produktfamilien von Blutdruckmanschetten erfüllen jeden denkbaren klinischen Bedarf.

Egal um welche Anwendung es sich handelt, welche Größe Sie benötigen und an welchen Monitor Sie die Blutdruckmanschette anschließen wollen: GE hat die richtige Lösung.



Standardisierung

Ihre Zeit sollte für Ihre Patienten da sein. Wir helfen Ihnen dabei.

einfache Auswahl,
einfacher Anschluss,
einfaches Anlegen

Anschlüsse, die an alle
führenden Monitore
passen

In der täglichen Krankenhausroutine ist jede Minute wertvoll. Gerade deshalb sollten Sie nicht lange nach der richtigen Blutdruckmanschette für einen Monitor suchen müssen. Mit der CRITIKON® Produktlinie kann das nicht passieren.

Die richtige Manschette auszusuchen, anzuschließen und präzise anzulegen, ist genauso einfach wie das Messen selbst. Damit unsere Manschetten mit den Blutdruckmonitoren in Ihrem Krankenhaus kompatibel sind, haben CRITIKON® Blutdruckmanschetten spezielle Anschlüsse, die an alle führenden Monitore passen.



Standardisierung

Mit CRITIKON® Manschetten Effizienz steigern

Universelles Anschlussystem mit X und Y Adapter

Aber es wird sogar noch leichter:
Das Schlüsselwort heißt Standardisierung.
Die Entwickler von CRITIKON® Manschetten
haben eine intelligente Methode gefunden,
alle CRITIKON® Blutdruckmanschetten in
Kombination mit jedem gängigen Monitor in
Ihrem Krankenhaus zu verwenden:
Das universelle Anschlussystem. Mit Hilfe der
X und Y Adapter können die CRITIKON®
Blutdruckmanschetten mit zwei Schläuchen
an die NIBD Monitore angeschlossen werden.
Das bedeutet bequeme Handhabung für das
medizinische Personal und die Blutdruck-
manschetten können jederzeit und überall im
Krankenhaus eingesetzt werden.

bequeme Handhabung

verringerte Lagerhaltung, vereinfachtes Bestell- wesen, nur ein Lieferant

Die Vorteile liegen außerdem in verringerter
Lagerhaltung, vereinfachtem Bestellwesen
und der einfachen Zusammenarbeit mit nur
einem Lieferanten, was deutliche Einspar-
ungen ermöglicht. Können Sie noch mehr
erwarten? Wir meinen ja: Wenden Sie sich an
den für Sie zuständigen Außendienstmit-
arbeiter für CRITIKON® Manschetten. Er wird
Ihnen helfen, im Bereich der Blutdruckmes-
sungen Kostensenkungsmöglichkeiten zu
erkennen und zu nutzen.

Support durch unseren Außendienst



GE kann Ihnen die X oder Y Adapter liefern, die die Standardisierung in Ihrem Haus
komplett machen:



Infektionskontrolle

Das CRITIKON® Konzept gegen Kreuzinfektionen

finanzielles Risiko von
Kreuzinfektionen

Auf der ganzen Welt setzen sich Mediziner und Pflegepersonal gegen die Gefahr der Kreuzinfektion zur Wehr, denn darin liegt eine Grundvoraussetzung Patienten zu helfen und sie zu heilen.

Lösungen für alle
klinischen Bereiche

Doch in heutigen Gesundheitssystemen stellen Kreuzinfektionen auch ein finanzielles Risiko dar, das die Wirtschaftlichkeit der medizinischen Versorgung gefährden kann. Für alle klinischen Bereiche, in denen die Gefahr einer Kreuzinfektion gegeben ist, bietet GE eine Reihe von günstigen Lösungen.

Manschetten für den
einmaligen Gebrauch

Eine davon ist die Verwendung von Blutdruckmanschetten für den einmaligen Gebrauch.



Infektionskontrolle

Gemeinsam Verantwortung übernehmen

beste
Reinigungsergebnisse
ohne antimikrobielle
Behandlung



Für Abteilungen, in denen Blutdruckmanschetten zur Mehrfachverwendung bevorzugt werden, empfehlen sich CRITIKON® Produkte mit einer widerstandsfähigen und leicht zu reinigenden Oberfläche. Das bedeutet beste Reinigungsergebnisse ohne antimikrobielle Oberflächenbehandlung.

ausführliche
Reinigungs- und
Desinfektions-
anleitung

Für CRITIKON® Blutdruckmanschetten wird bewusst auf den Einsatz antimikrobieller Stoffe verzichtet, denn es ist erwiesen, dass die Verwendung dieser Mittel dazu führt, dass immer mehr Keime resistent werden. Deshalb haben wir uns entschlossen, einen hohen hygienischen Standard mit verantwortlicheren Konzepten zu schaffen. Um beste Reinigungsergebnisse zu ermöglichen, liegt CRITIKON® Manschetten eine ausführliche Reinigungs- und Desinfektionsanleitung bei.

ZUSAMMENFASSUNG: Diese Studie bestätigt, dass wir uns des Risikos einer Kreuzkontaminierung von Patienten und medizinischem Personal durch scheinbar harmlose Gegenstände, wie Blutdruckmanschetten, die im Krankenhaus ständig Verwendung finden, bewusst sein müssen.

(THE MICRONIAL FLORA OF IN-USE BPC von M.G.M. Cormican, D.L. Lowe, P. Flynn, D. O'TOOLE, Irish Journal of Medical Sciences 1994; 4; 112-3)

„...Es wird unterschätzt, dass ein großer Anteil von Mikroorganismen - Viren, Pilze, Parasiten und auch Bakterien - resistent gegen antimikrobielle Substanzen werden.“ (Anthony S. Fauci, M.D., Director, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health, USA, 1999)

Funktionalität

vielfältiges Sortiment


Für die exakte Messung und den höchsten Patientenkomfort ist die genaue Größenauswahl der Blutdruckmanschette unerlässlich. Aus diesem Grund haben wir ein besonders vielfältiges Sortiment von Blutdruckmanschetten entwickelt. CRITIKON® Manschetten sind mit einem Umfang von 3 cm für Frühgeborene bis zu 50 cm für Messungen am Oberschenkel erhältlich.

Platzierungs- und Größenmarkierungen

Das funktionelle Design der CRITIKON® Blutdruckmanschetten umfasst deutliche Platzierungs- und Größenmarkierungen für eine schnelle und korrekte Anpassung. Außerdem haben unsere Blutdruckmanschetten eine Farbkodierung, durch die die verschiedenen Größen besonders einfach zu erkennen sind.

Farbkodierung für einfache Größenauswahl

NEONATAL

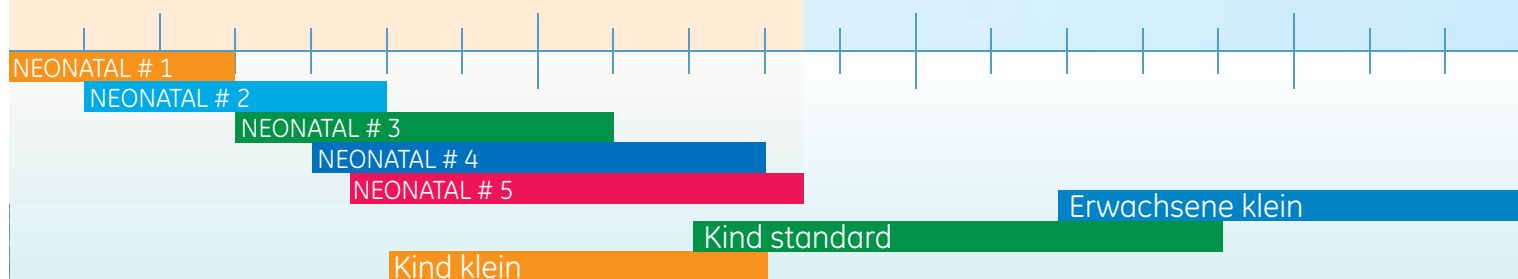

Kind klein	Kind standard	Erw. klein	Erw. standard	Erw. groß	Oberschenkel
Umfang: 8-13 cm	Umfang: 12-19 cm	Umfang: 17-25 cm	Umfang: 23-33 cm	Umfang: 31-40 cm	Umfang: 38-50 cm

Die meisten dieser Manschetten sind zusätzlich auch in langer Ausführung erhältlich, siehe Produktverzeichnis.

Funktionalität

erfüllen EN1060
Normen und ANSI/AAMI
SP10 Standards

latexfrei

CRITIKON® Blutdruckmanschetten erfüllen EN1060 Normen und die Standards sowohl der American Heart Association als auch der ANSI/AAMI SP10. Aufgrund der immer häufigeren allergischen Reaktionen auf Latex bei medizinischem Personal sind alle CRITIKON® Manschetten latexfrei.

ZUSAMMENFASSUNG: Der Wissenschaftler weist darauf hin, dass in mehreren Studien belegt wurde, dass zu kleine Blutdruckmanschetten den tatsächlichen Blutdruck zu hoch angeben und zu große ihn zu niedrig angeben, und zwar um 10 bis 30 mmHg. Zu kleine Blutdruckmanschetten können deshalb eine Überbehandlung von Bluthochdruck, zu große eine Unterbehandlung zur Folge haben...

(MISCUFFING: INAPPROPRIATE BPC APPLICATION von D.M. Manning, C. Kuchirka, J. Kaminski, Circulation, 1983 Oct; 68(4);763-6)



LATEX FREI

CE CRITIKON Blutdruckmanschetten halten die europäischen Normen EN 1060-1, EN 1060-2 und EN 1060-3 ein, bzw. übertreffen diese.

DURA-CUF®



Angenehm weiches, langlebiges Nylon für Patientenkomfort

Hohe Qualität, mehrfach verwendbar

Praktisch und einfach zu reinigen

Besonders starker Klettverschluss

Platzierungs- und Größenmarkierung für korrektes Anlegen

Latex- and PVC-frei



DURA-CUF® ist die ideale Allround-Blutdruckmanschette für die anspruchsvolle tägliche Arbeit in den meisten klinischen Abteilungen. Sie ist zur Mehrfachverwendung in Bereichen mit geringem Infektionsrisiko vorgesehen.

DURA-CUF® hat eine weiche Oberfläche und abgerundete Ecken, um die Blutdruckmessung für den Patienten so bequem wie möglich zu machen. Selbst in aufgeblasenem Zustand schneidet die Manschette nicht ein und kneift nicht. Die Handhabung und Größenauswahl ist denkbar einfach.



DURA-CUF®



DURA-CUF®



CRITIKON
DINAMAP

PHILIPS/HP
SIEMENS
SPACELABS
DATASCOPE

GE MEDICAL
SYSTEMS
MARQUETTE

DATEX
OHMEDA

PROTOCOL

Manuelles
Wand-
manometer



Größe	Farbe	Umfang	2-Schlauch Schraubverschluss (VE 1)	1-Schlauch Bajonettverschluss (VE 1)	2-Schlauch Subminiaturverschluss (VE1)	2-Schlauch angepasster Subminiaturverschluss (VE 1)	1-Schlauch Subminiaturverschluss (VE 1)	DURA-CUF® Aufblas-system (VE 5)
-------	-------	--------	-------------------------------------	--------------------------------------	--	---	---	---------------------------------

Kind klein	• Orange	8-13 cm	002783E	002274E	002200E	2750E*	2740E	002385
Kind standard	• Grün	12-19 cm	002781E	002275E	002201E	2751E	2741E	002384
Kind standard lang	• Grün	12-19 cm	2785E					002386
Erw. klein	• Hellblau	17-25 cm	002779E	002276E	002202E	2752E	2742E	002383
Erw. klein lang	• Hellblau	17-25 cm						002387
Erw. mit Aufhänger	• Blau	23-33 cm	002771E					002380
Erw. standard	• Blau	23-33 cm	002774E	002277E	002203E	2753E	2743E	
Erw. standard lang	• Blau	23-33 cm	002772E	002130E	002206E	2756E		2388
Erw. groß	• Weinrot	31-40 cm	002791E	002278E	002204E	2754E	2744E	002381
Erw. groß lang	• Weinrot	31-40 cm	002784E	002131E	002207E	2757E		2389
Oberschenkel	• Braun	38-50 cm	002796E	002279E	002205E	2755E	2745E	002382

*mit 2-Schlauch-Luerverschluss

DURA-CUF® Bestellsortiment - 2-Schlauch Schraubverschlüsse

- 002699** 1x Kind klein, 1x Kind standard, 1x Erw. klein, 1x Erw. standard, 1x Erw. groß, 1x Oberschenkel
- 002697** Sortiment Kinder: 2x Kind klein, 3x Kind standard, 1x Erw. klein
- 002698** Sortiment Erwachsene: 1x Erw. klein, 2x Erw. standard, 1x Erw. standard lang, 1x Erw. groß, 1x Erw. groß lang

DURA-CUF® Bestellsortiment - 2-Schlauch Schraubverschlüsse

- 2299** 1x Kind klein, 1x Kind standard, 1x Erw. klein, 1x Erw. standard, 1x Erw. groß, 1x Oberschenkel
- 2296** Sortiment Kinder: 2x Kind klein, 3x Kind standard, 1x Erw. klein
- 2297** Sortiment Erwachsene: 1x Erw. klein, 2x Erw. standard, 1x Erw. standard lang, 1x Erw. groß, 1x Erw. groß lang



SOFT-CUF®



- Weiches, absorbierendes Material
- Wirtschaftlich für den Einpatienteneinsatz
- Farbkodierung der Größen
- Platzierungs- und Größenmarkierung für korrektes Anlegen
- Latexfrei



SOFT-CUF® ist die richtige Wahl für maximalen Patientenkomfort und Infektionskontrolle. Sie ist eine hervorragende Lösung für alle klinischen Bereiche, in denen das Infektionsrisiko besonders hoch ist.

Die Verwendung von SOFT-CUF® als Einpatientenmanschette verringert den Arbeitsaufwand und beschleunigt die Arbeitsabläufe.

SOFT-CUF® hat eine flauschige, absorbierende und gleichzeitig langlebige Oberfläche.

Besonders sensible Patienten, bei denen häufig der Blutdruck gemessen werden muss, werden die komfortable Anwendung der SOFT-CUF® Manschette bestätigen.



SOFT-CUF®



SOFT-CUF®



Größe	Farbe	Umfang	2-Schlauch Schraubverschluss (VE 20)	1-Schlauch Bajonettverschluss (VE 20)	2-Schlauch Subminiaturverschluss (VE 20)	2-Schlauch angepasster Subminiaturverschluss (VE 20)	1-Schlauch Subminiaturverschluss (VE 20)	SOFT-CUF® Aufblas-system (VE 5)
-------	-------	--------	--------------------------------------	---------------------------------------	--	--	--	---------------------------------

Kind klein	• Orange/Weiß	8-13 cm	2500	2360	2401	2450*	2320	
Kind standard	• Grün/Weiß	12-19 cm	2501	2361	2402	2451	2321	002584
Kind standard lang	• Grün/Weiß	12-19 cm	2506		2400			
Erw. klein	• Hellblau/Weiß	17-25 cm	2502	2362	2403	2452	2322	002583
Erw. klein lang	• Hellblau/Weiß	17-25 cm	2507		2407			
Erw. standard	• Blau/Weiß	23-33 cm	2503	2363	2404	2453	2323	002580
Erw. standard lang	• Blau/Weiß	23-33 cm	2604	2140	2116	2454		002582
Erw. groß	• Rosa/Weiß	31-40 cm	2504	2364	2405	2455	2324	002581
Erw. groß lang	• Rosa/Weiß	31-40 cm	2644	2141	2117	2456		002585
Oberschenkel	• Braun/Weiß	38-50 cm	2505	2365	2406	2457	2325	

*mit 2-Schlauch-Luerverschluss

SOFT-CUF® Bestellsortiment - 2-Schlauch Schraubverschlüsse

002695 1x Kind klein, 1x Kind standard, 2x Erw. klein, 2x Erw. standard, 1x Erw. standard lang, 2x Erw. groß, 1x Oberschenkel

SOFT-CUF® Bestellsortiment - 2-Schlauch Subminiaturverschlüsse

2298 1x Kind klein, 1x Kind standard, 2x Erw. klein, 2x Erw. standard, 1x Erw. standard lang, 2x Erw. groß, 1x Oberschenkel

CLASSIC-CUF®



- Leicht zu reinigende Vinyloberfläche
- Haltbar genug für wiederholte Messungen
- Platzierungs- und Größenmarkierung für korrektes Anlegen
- Viele Größen für Neugeborene bis Erwachsene
- Gelbe Manschetten für Isolierstationen
- Latexfrei



In vielen Operationssälen und Intensivstationen auf der ganzen Welt wird die CLASSIC-CUF® Blutdruckmanschette von Ärzten und Pflegepersonal wegen ihrer außergewöhnlichen Langlebigkeit und Genauigkeit der Messungen eingesetzt.

In Bereichen des Krankenhauses, in denen das Infektionsrisiko und folglich die Hygieneanforderungen besonders hoch sind, stellt CLASSIC-CUF® eine vernünftige Alternative zur Verwendung von SOFT-CUF® dar. Die latexfreie Oberfläche ist leichter zu reinigen als bei jeder anderen Blutdruckmanschette.

Die gelbe CLASSIC-CUF® ist speziell für die Verwendung in Stationen mit hohem Infektionsrisiko vorgesehen.



CLASSIC-CUF®



CLASSIC-CUF®



Größe	Farbe	Umfang	2-Schlauch Schraubverschluss (VE 20)	1-Schlauch Bajonettverschluss (VE 20)	2-Schlauch Subminiaturverschluss (VE 20)	2-Schlauch angepasster Subminiaturverschluss (VE 20)	1-Schlauch Subminiaturverschluss (VE 20)	SOFT-CUF® Aufblas-system (VE 5)
-------	-------	--------	--------------------------------------	---------------------------------------	--	--	--	---------------------------------

Kind klein	• Orange/Weiß	8-13 cm	2618	2300	2354	2170*	2150	
Kind standard	• Grün/Weiß	12-19 cm	2613	2301	2355	2171	2151	002287
Erw. klein	• Hellblau/Weiß	17-25 cm	2608	2302	2356	2172	2152	002285
Erw. standard	• Blau/Weiß	23-33 cm	2603	2303	2357	2173	2153	002283
Erw. standard lang	• Blau/Weiß	23-33 cm	2647	2306	2352	2174		
Erw. groß	• Rosa/Weiß	31-40 cm	2643	2304	2358	2175	2154	002281
Erw. groß lang	• Rosa/Weiß	31-40 cm	2649	2307	2353	2176		
Oberschenkel	• Braun/Weiß	38-50 cm	2648	2305	2359	2177	2155	

Für Isolierstationen:

Kind klein	• Gelb	8-13 cm	2650		2670			
Kind standard	• Gelb	12-19 cm	2651		2671			
Erw. klein	• Gelb	17-25 cm	2607		2672			
Erw. standard	• Gelb	23-33 cm	2602		2673			
Erw. groß	• Gelb	31-40 cm	2642		2674			
Oberschenkel	• Gelb	38-50 cm	2652		2675			

*mit 2-Schlauch-Luerverschluss

CLASSIC-CUF® Bestellsortiment - 2-Schlauch Schraubverschlüsse

2692 1x Kind klein, 1x Kind standard, 2x Erw. klein, 2x Erw. standard, 1x Erw. standard lang, 2x Erw. groß, 1x Oberschenkel

CLASSIC-CUF® Bestellsortiment - 2-Schlauch Subminiaturverschlüsse

2292 1x Kind klein, 1x Kind standard, 2x Erw. klein, 2x Erw. standard, 1x Erw. standard lang, 2x Erw. groß, 1x Oberschenkel



SENSA-CUF®



- Weiches und leicht zu reinigendes Material
- Wieder verwendbar für mehrere Patienten
- Ideal für Langzeiteinsatz auf Intensivstationen
- Platzierungs- und Größenmarkierung für korrektes Anlegen
- Latex- und PVC-frei



SENSA-CUF® ist möglicherweise die am breitesten einsetzbare Manschette auf dem Markt. Trotz ihrer Wirtschaftlichkeit bietet sie alle Vorteile der CRITIKON® Produktlinie: Qualität und hervorragende Funktionalität. So ist es möglich sie wieder zu verwenden oder bei Bedarf als Einpatientenmanschette einzusetzen.

Damit schließt sie die Lücke zwischen der langlebigen DURA-CUF® und der SOFT-CUF® für den Einpatienteneinsatz.

SENSA-CUF® ist ein sehr wirtschaftliches Produkt, das aber dennoch die gleiche Qualität bietet, für die CRITIKON® Manschetten seit mehr als 20 Jahren bekannt sind.



SENSA-CUF®



SENSA-CUF®



CRITIKON
DINAMAP

PHILIPS/HP
SIEMENS
DATASCOPE
SPACELABS

GE MEDICAL
SYSTEMS
MARQUETTE



Größe	Farbe	Umfang	2-Schlauch Schraub- verschluss (VE 5)	1-Schlauch Bajonett- verschluss (VE 5)	2-Schlauch Subminiatur- verschluss (VE 5)
-------	-------	--------	--	---	--

Kind klein	• Orange/Weiß	8-13 cm	2458	2470	2482
Kind standard	• Grün/Weiß	12-19 cm	2460	2472	2484
Erw. klein	• Hellblau/Weiß	17-25 cm	2462	2474	2486
Erw. klein lang	• Hellblau/Weiß	17-25 cm	2463	2475	2487
Erw. standard	• Blau/Weiß	23-33 cm	2464	2476	2488
Erw. standard lang	• Blau/Weiß	23-33 cm	2465	2477	2489
Erw. groß	• Rosa/Weiß	31-40 cm	2466	2478	2490
Erw. groß lang	• Rosa/Weiß	31-40 cm	2467	2479	2491
Oberschenkel	• Braun/Weiß	38-50 cm	2468	2480	2492

SENSA-CUF® Bestellsortiment - 2-Schlauch Schraubverschlüsse

2494 1x Erw. klein, 1x Erw. standard, 1x Erw. groß

CRITIKON® Neonatal



- Weiches, absorbierendes Material oder Vinyl
- Einpatientenverwendung
- Größenindex mit dekorativen Tiermotiven
- Platzierungs- und Größenmarkierung für korrektes Anlegen
- Verwendung mit neonatalen Blutdruckschläuchen
- Latexfrei



Die jüngsten Patienten bedürfen der umsichtigsten Behandlung. Deshalb bietet GE zwei CRITIKON® Blutdruckmanschettenreihen für Frühgeborene und Babys an.

SOFT-CUF® hat eine extrem weiche und absorbierende Oberfläche, sodass gerade die kleinen Patienten so bequem überwacht werden, wie sie es verdienen. SOFT-CUF® ist für die Einpatientenverwendung vorgesehen und hilft dadurch, das Risiko einer nosokomialen Infektion zu vermeiden.

Eine weitere Option für die Versorgung Früh- und Neugeborener im Intensivbereich ist die CLASSIC-CUF® für Neugeborene.

SOFT-CUF® und CLASSIC-CUF® sind je in 5 Neugeborenenengrößen erhältlich. Ihr dekoratives Design erleichtert die Suche nach der richtigen Größe.



CRITIKON® Neonatal



SOFT-CUF® und CLASSIC-CUF®

Verpackungseinheit: 20 Stück



CRITIKON DINAMAP GE MEDICAL SYSTEMS MARQUETTE DATEX-OHMEDA* MDE	PHILIPS/HP SIEMENS SPACELABS DATASCOPE	CRITIKON DINAMAP GE MEDICAL SYSTEMS MARQUETTE DATEX-OHMEDA*	PHILIPS/HP SIEMENS SPACELABS DATASCOPE
---	---	--	---



Größe	Farbe	Umfang	SOFT-CUF® 2-Schlauch	SOFT-CUF® 1-Schlauch	CLASSIC-CUF® 2-Schlauch	CLASSIC-CUF® 1-Schlauch
-------	-------	--------	-------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------------------

1	Orange/Weiß	3-6 cm	2521	2121	2638	2138
2	Hellblau/Weiß	4-8 cm	2422	2122	2633	2133
3	Grün/Weiß	6-11 cm	2523*	2124	2628*	2128
4	Blau/Weiß	7-13 cm	2524*	2125	2623*	2123
5	Rosa/Weiß	8-15 cm	2525*	2126	2619*	2119

SOFT-CUF® Bestellsortiment - 2-Schlauch Luer-Verschlüsse

2694 2x Neo #1, 3x Neo #2, 5x Neo #3, 5x Neo #4, 5x Neo #5

SOFT-CUF® Bestellsortiment - 1-Schlauch Luer-Verschlüsse

2696 2x Neo #1, 3x Neo #2, 5x Neo #3, 5x Neo #4, 5x Neo #5

CLASSIC-CUF® Bestellsortiment - 2-Schlauch Luer-Verschlüsse

2693 2x Neo #1, 3x Neo #2, 5x Neo #3, 5x Neo #4, 5x Neo #5

CLASSIC-CUF® Bestellsortiment - 1-Schlauch Luer-Verschlüsse

2680 2x Neo #1, 3x Neo #2, 5x Neo #3, 5x Neo #4, 5x Neo #5

General Electric Company behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung oder Verpflichtung die hier beschriebenen Angaben und Charakteristika zu ändern oder die Herstellung des beschriebenen Produktes einzustellen. Für die jeweils aktuellsten Informationen wenden Sie sich an Ihren GE-Repräsentanten.

© 2005 General Electric Company
GE Medical Systems Information Technologies GmbH,
A General Electric Company, going to market as GE Healthcare



So erreichen Sie uns

HOLTMANN Medizintechnik GmbH
Reeserward 11
46459 Rees

T (02851) 965266
info@holtmann-mt.de

Besuchen Sie uns im Web:
www.holtmann-mt.de

Seit mehr als 100 Jahren vertrauen Entscheidungsträger im medizinischen Bereich auf medizinische Technologie, Dienstleistungen und Lösungen zur Produktivitätssteigerung von GE Healthcare.

Welchen Herausforderungen sich Ihre Einrichtung auch ausgesetzt sieht – GE hilft Ihnen jederzeit, Ihren Patienten eine qualitativ hochwertige Versorgung bieten zu können.

Für zusätzliche Informationen wenden Sie sich bitte noch heute an Ihren GE-Repräsentanten.

GE Medical Systems Information Technologies GmbH
Munzinger Straße 3-5
79111 Freiburg, Germany
Tel. +49 761 4543 0; Fax +49 761 4543 233

www.gehealthcare.com



GE imagination at work